

SARS-COV-2-ANTIGEN RAPID SPEICHEL TEST KIT



Pappbecher



Testgerät



Mundstäbchen



Extraktionsröhrchen und Stopel



Blister mit Flüssigkeit



ENTWEDER:
In Pappbecher
spucken



ODER:
Speichel mit Mund-
stäbchen aufnehmen



Speichel 5 Sekunden,
gemeinsam mit Test-
flüssigkeit schütteln



3 Tropfen auf
Testgerät

Symbolfoto



Allgemeine Informationen

Einfache Testdurchführung (keine invasive Probenentnahme notwendig).
Schnelles Testergebnis (innerhalb 10-15min).
Keine Kühlkettentransport erforderlich.

Produktinformationen

Prinzip:
Schneller Nachweis von Sars CoV 2 Nucleo Protein Antigen im Speichel
Klinische Sensitivität 95%
Klinische Spezifität 95%

Inhalt

20 x Testgeräte
20 x Mundstäbchen
20 x Pappbecher
20 x Extraktionsröhrchen mit Stopel
20 x Probenentnahmepuffer (Blister mit Flüssigkeit)

Zertifikate

CE, ISO13485